


PATENTED TECHNOLOGY

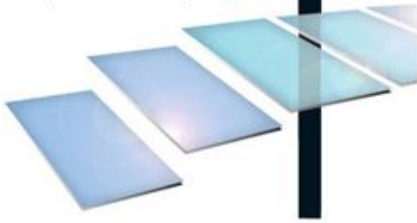

liftup




making two worlds into one

Equal opportunities EasyLift

FlexStep Systems

+45 9686 3020 • www.liftup.dk • Aalborg • DENMARK

Guida d'uso EasyLift

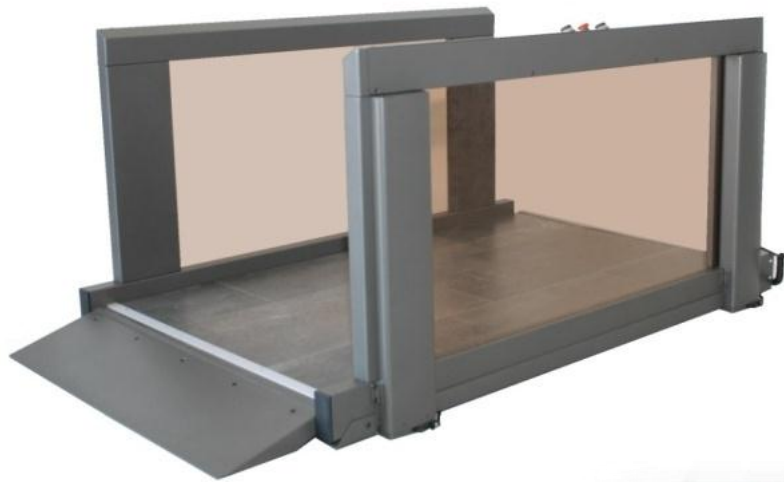

+45 9686 3020 • www.liftup.dk • Aalborg • DENMARK

FlexStep Systems



USER MANUAL EASYLIFT IT VERSION 2.1



Indice

Indice.....	2
1. Introduzione.....	3
2. Dichiarazione di conformità CE.....	4
3. Certificato di omologazione	5
4. Condizioni d'uso.....	6
5. Specifiche tecniche.....	7
6. Norme di sicurezza	8
Sicurezza individuale.....	9
Movimentazione	9
7. Principi di funzionamento	11
8. Montaggio	11
9. Avviare la piattaforma.....	11
10. Azionare la piattaforma	12
11. Funzionamento.....	13
12. Manutenzione	15
13. Installazione e trasferimento.....	17
14. Lista di controllo della manutenzione	18
15. Libretto manutenzione.....	19
16. Pezzi di ricambio.....	20
17. Smontaggio.....	21
18. Smaltimento.....	21
19. Garanzia.....	21



1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questa piattaforma elevatrice.

Leggere completamente il manuale prima di usare la piattaforma elevatrice.

Il montaggio e l'installazione DEVONO essere effettuati da un tecnico di assistenza autorizzato da Liftup, per assicurare un assemblaggio corretto. Un'errata installazione può portare a pericoli o rischi involontari.

EasyLift è una piattaforma elevatrice per sedie a rotelle che offre agli utilizzatori un facile ed elegante accesso tra due livelli. La piattaforma è semplice da azionare per mezzo di pannelli di comando montati sul muro o di un elegante telecomando.

2. Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

Direttiva macchine 2006/42/CE

Fabbricante: Liftup ApS
Indirizzo: Tingager 2, DK-9530 Støvring, Danimarca
Telefono: +45 9686 3020

Con la presente dichiara che:

Apparecchiatura: **EasyLift**
Piattaforma elevatrice per utilizzatori di sedie a rotelle e persone a mobilità ridotta

Anno: 2007

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva macchine:

Per la valutazione è stata usata la seguente:

ISO 9386- 1: 2000 Piattaforme elevatrici elettriche.

è conforme alla direttiva EMC-2004/108/CE del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttore

Qualifica

Flemming Eriksen

Nome

Liftup ApS, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca

Luogo

01-12-2009

Data

Firma

3. Certificato di omologazione

UNA COPIA DEL MARCHIO CE
SARÀ INSERITA QUI



4. Condizioni d'uso

La piattaforma è prevista esclusivamente per l'uso da parte di utilizzatori di sedie a rotelle e persone a mobilità ridotta.

Il carico massimo è di 300 kg uniformemente distribuiti sulla piattaforma / un massimo di 2 persone.


Leggere completamente questo manuale d'uso prima di usare la piattaforma.

La piattaforma NON deve essere usata per trasportare merci; non bisogna caricare sulla piattaforma pallet con merci o altri tipi di carichi pesanti.


Il proprietario della piattaforma è obbligato a provvedere alla sua manutenzione in conformità con la Guida di manutenzione della sezione 12.

5. Specifiche tecniche

Modello alto

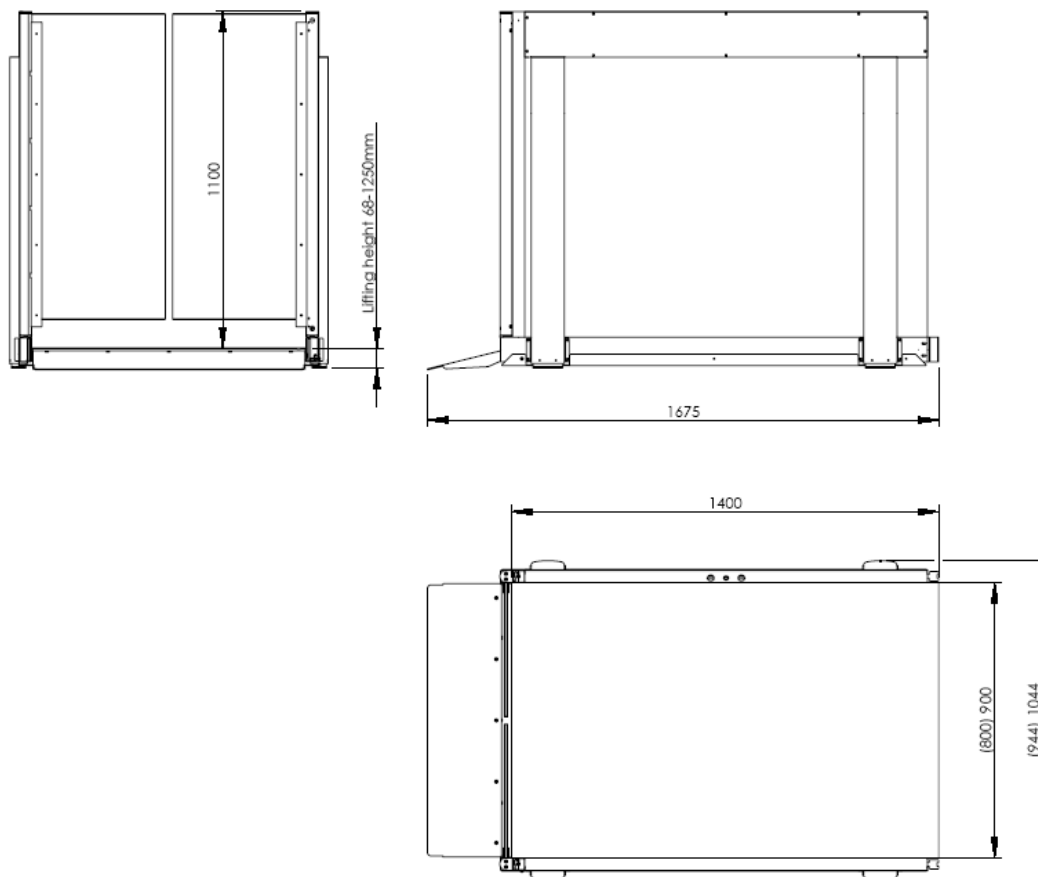

Modello basso

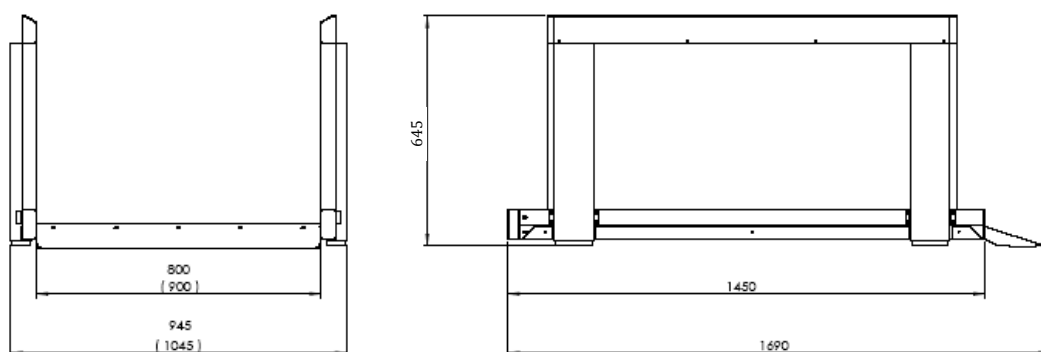

Specifiche tecniche:

Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz 10A.

Carico max.: 300 kg o 2 persone

Dimensioni: 900x1400 mm

Peso: circa 100 kg

Rumore: < 70 db.



6. Norme di sicurezza

Importanti misure di sicurezza

Installazione e manutenzione

Non cercare di installare o fare la manutenzione della piattaforma EasyLift. Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico di assistenza autorizzato: NON rimuovere le coperture di protezione o le coperture di sicurezza perché in questo modo potreste aprire la EasyLift causando involontarie lesioni personali.

Movimento involontario di EasyLift

Se, durante l'uso della EasyLift, si verificano azioni o movimenti non descritti in questo manuale, fermare l'apparecchio e chiedere assistenza tecnica.

Se la EasyLift non si sposta con un movimento orizzontale come una piattaforma, calibratela abbassandola al livello del pavimento; se il problema persiste, chiedere assistenza tecnica.

Movimento della EasyLift

Tenere l'area sotto la EasyLift sgombra da oggetti o materiali che possano impedire il suo movimento verso il basso. Altrimenti la EasyLift non si potrà muovere verso il basso fino al livello inferiore e così non potrà compiere la sua funzione di piattaforma elevatrice.

Se un oggetto/materiale impedisce alla EasyLift di muoversi verso il basso, la piattaforma interromperà il suo movimento ed emetterà un allarme acustico. L'oggetto o il materiale deve essere rimosso prima che la piattaforma possa essere usata nuovamente.

Evitare infortuni.

Per evitare infortuni, gli utilizzatori NON devono usare la EasyLift quando qualcuno o qualcosa rischia di rimanere schiacciato, cadere, scivolare, tagliarsi o subire altre lesioni. L'utilizzatore/operatore cercherà quanto più possibile di assicurare che la EasyLift possa muoversi senza rischi di causare lesioni.

Prestare molta attenzione quando bambini piccoli e persone disabili si trovano sopra o attorno alla piattaforma, poiché è probabile che non siano in grado di prevedere le possibili conseguenze dei movimenti della piattaforma.

Sovraccarico della piattaforma

Per evitare danni all'apparecchiatura dovuti a sovraccarico (max. 300 kg distribuiti uniformemente), la EasyLift è munita di una protezione contro il sovraccarico che ferma la piattaforma ed emette un allarme sonoro se si verifica un sovraccarico. In caso di sovraccarico, spostare la piattaforma verso il basso per uscire.

* Ha seguito una formazione sul prodotto e l'assistenza da parte di Liftup.



Attenzione



Sebbene la piattaforma sia dotata di vari dispositivi di sicurezza, non azionarla mai se persone o animali sono così vicini da correre il rischio di essere schiacciati.
Non lasciare mai che i bambini giochino sulla o con la piattaforma.

Sicurezza individuale


La EasyLift è dotata di vari meccanismi di sicurezza per garantire che l'utilizzatore o altre persone non si feriscano usando la piattaforma.

Protezione antischiacciamento:

Una piastra di pressione (protezione antischiacciamento) è installata sotto tutta la piattaforma ed è attivata se un oggetto è schiacciato sotto di essa. Quando è attivata la protezione antischiacciamento la piattaforma si ferma e si muove di 3-5 cm nella direzione opposta, mentre contemporaneamente risuona un allarme acustico.

Se la protezione antischiacciamento è attivata, rilasciare il pulsante, rimuovere ogni oggetto sotto la piattaforma e quindi spostarla di nuovo al livello del pavimento. (Se necessario, muovere la piattaforma verso l'alto per una piccola distanza in modo da rimuovere più facilmente gli oggetti sotto di essa).

NB! In caso di installazioni all'aperto ricordarsi che foglie, rami e neve possono far scattare la protezione antischiacciamento: dovrete quindi controllare regolarmente se ci sono oggetti sotto la piattaforma. Per installazioni all'aperto raccomandiamo quindi di riportare l'elevatore al livello del suolo dopo l'uso, per evitare che oggetti indesiderati possano infilarsi sotto la piattaforma.

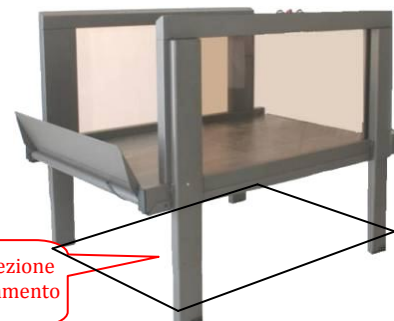

Protezione anticaduta:

Quando si muove la piattaforma verso l'alto, la rampa innanzitutto si solleverà e si bloccherà prima che la piattaforma inizi a muoversi. La rampa adesso si comporta come una protezione anticaduta.

Quando la piattaforma è riportata al livello del pavimento, la rampa si abbasserà automaticamente e funzionerà come una rampa di accesso/uscita.

Se la piattaforma è dotata di porte queste si chiuderanno e bloccheranno prima che la piattaforma inizi a muoversi. Queste porte saranno sempre chiuse e bloccate quando la piattaforma si sposta dal livello del suolo.




Rampa abbassata come rampa di accesso/uscita



Rampa sollevata come protezione-anticaduta

Movimentazione

La piattaforma normalmente è fornita dal rivenditore che si occuperà anche della sua installazione.

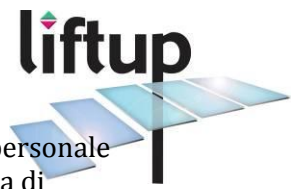

Non cercate di muovere la piattaforma a mano perché c'è il rischio di una lesione personale permanente. Spostare e movimentare la piattaforma usando l'apposita attrezzatura di sollevamento.

Non esporre la piattaforma a forti urti o sobbalzi perché si potrebbe danneggiare la sua funzionalità.

Conservare il telecomando* fornito insieme alla piattaforma in un luogo asciutto e non esporlo a forti colpi (per esempio lanciandolo). Pulirlo solo con uno straccio ben strizzato.

* Attrezzatura supplementare



7. Principi di funzionamento

La piattaforma EasyLift è un cosiddetto elevatore “a uomo presente” cioè i pulsanti devono essere tenuti premuti per l’intero movimento.

Il funzionamento della piattaforma è semplice; l’utente la attiva usando uno dei pulsanti sul muro o per mezzo del telecomando* fornito.

Quando l’utente è sulla piattaforma questa è azionata dal pannello laterale, dal quale l’utente può scegliere di essere trasportato rispettivamente al livello superiore o inferiore.

8. Montaggio

L’installazione della piattaforma va effettuata da un tecnico di assistenza autorizzato.

Non cercare di muovere, smontare o riparare la EasyLift. Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico di assistenza autorizzato.

Un montaggio errato può aumentare il rischio di lesioni dell’utente. Liftup declina ogni responsabilità se il montaggio e l’installazione non sono effettuati da un tecnico di assistenza autorizzato.

Per maggiori informazioni o la documentazione del montaggio, contattare Liftup al numero +45 9686 3020, o sul sito www.liftup.dk.

9. Avviare la piattaforma

L’unità di comando della piattaforma deve essere sempre collegata a una presa di corrente 230 V ed essere alimentata.

In normali circostanze la piattaforma è sempre in modalità stand-by, cioè pronta per l’uso non appena è premuto uno dei pulsanti di funzionamento.

Se è stato premuto l’arresto di emergenza, deve essere disattivato prima che la piattaforma possa essere usata (consultare la sezione 10 “Azionare la piattaforma”).

* Attrezzatura supplementare

10. Azionare la piattaforma

Uso quotidiano

La EasyLift è azionata attraverso due pannelli di comando posti sopra e sotto di essa, o usando il telecomando*. Il telecomando sostituisce i due pannelli con i pulsanti.

Per fare scendere l'elevatore, tenere premuto il bottone (Fig. 1) situato al livello inferiore o sul telecomando (Fig. 2) con la freccia in giù finché la piattaforma non si è mossa completamente verso il basso e si è fermata, e la rampa si è abbassata (e le porte si sono aperte, se presenti*). Una volta che la rampa si è abbassata, l'utilizzatore può entrare nella piattaforma.

Per fare salire l'ascensore, tenere premuto il tasto (Fig. 1) situato al livello superiore o sul telecomando (Fig. 2) con la freccia in su finché la piattaforma non si è mossa completamente verso l'alto e si è fermata e le porte* si sono aperte (se presenti). Una volta che le porte si sono aperte completamente, l'utilizzatore può entrare nella piattaforma.

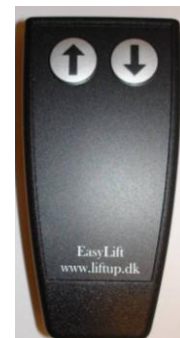



Fig. 2
Telecomando


Sulla piattaforma ci sono tre bottoni –uno con una freccia in su, uno con una freccia in giù e uno per l'arresto di emergenza.



 Quando siete sulla piattaforma e volete salire al livello superiore, premete il bottone con la freccia in su. La rampa o le porte* si chiuderanno e la piattaforma inizierà a muoversi verso l'alto. Tenete premuto il bottone finché non avete raggiunto il livello superiore, la piattaforma si è fermata e le porte* si sono aperte completamente. Adesso potete uscire dalla piattaforma.

Quando siete sulla piattaforma e volete accedere al livello inferiore, premete e tenete premuto il tasto con la freccia in giù. Le porte* si chiuderanno e la piattaforma inizierà a muoversi verso il basso. Tenete premuto il bottone finché non avete raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si è fermata e la rampa/le porte* si sono aperte completamente. Adesso potete uscire dalla piattaforma.

Arresto di emergenza

 Se la piattaforma fa un movimento involontario o indesiderato, o se deve essere fermata per evitare potenziali rischi, premete il bottone dell'ARRESTO DI EMERGENZA. Per resettare l'arresto di emergenza, girate il bottone in senso orario e il sistema sarà di nuovo pronto per l'uso.

11. Funzionamento

Per un funzionamento normale, la EasyLift deve essere sempre collegata a una presa di corrente a 230 V.

È molto importante non scollegare o spegnere la corrente perché una lunga interruzione dell'alimentazione (1-2 settimane) può esaurire la batteria, facendo così smettere di funzionare la EasyLift.

In caso di guasto dell'alimentazione risuonerà un allarme sonoro. Per maggiori informazioni, consultare la sezione qui sotto "Batteria ausiliaria".

Batteria ausiliaria

Nel caso di un guasto dell'alimentazione 230 V o se l'unità di comando per qualche altra ragione non è alimentata da corrente, il sistema passerà automaticamente alla modalità ausiliaria. Questo significa che il sistema continuerà a funzionare normalmente poiché è alimentato dalla batteria ausiliaria.

Il guasto dell'alimentazione di rete sarà segnalato da un allarme acustico; non appena l'alimentazione di rete è riconnessa questo allarme si interromperà. Il sistema adesso funziona normalmente.

Se non è possibile ristabilire immediatamente l'alimentazione elettrica e volete annullare l'allarme, premete il bottone dell'arresto di emergenza. (Ricordate che in un caso simile il sistema dovrà essere calibrato - vedere sotto).



Importante!



Se sia l'alimentazione 230 V che l'arresto di emergenza sono stati scollegati contemporaneamente, il sistema passerà automaticamente a una modalità di sicurezza e deve quindi essere calibrato. (Vedere sotto).

Calibratura dopo un arresto di emergenza/guasto dell'alimentazione

Se è stato attivato l'arresto di emergenza e l'alimentazione elettrica è stata interrotta, o se il sistema registra altri tipi di irregolarità, sarà necessaria una calibratura. La piattaforma passerà quindi in una speciale modalità di sicurezza che le permette solo di muoversi verso il basso a una velocità molto ridotta.

Modalità sicura

In particolari condizioni in cui la EasyLift è fuori sincronizzazione, la EasyLift passerà in una modalità sicura in cui la piattaforma si fermerà dopo un movimento di circa 10 cm. Premere quindi l'arresto di emergenza e rilasciarlo, dopo di che il bottone di discesa è di nuovo attivato. Continuare questa procedura finché la piattaforma non è completamente giù e la

rampa abbassata. Una volta che la rampa è in basso e tutte le 4 gambe sono sul pavimento il sistema è calibrato e adesso funzionerà normalmente.

IMPORTANTE!



Se notate che la piattaforma non si muove come previsto, o si ferma dopo solo pochi centimetri, ci possono essere problemi tecnici che hanno bisogno di essere risolti da tecnici qualificati. In tale caso, contattate il vostro rivenditore.

12. Manutenzione

Effettuare solo una pulizia generale usando uno straccio ben strizzato. NON usare pulitori ad alta pressione né lavare direttamente la piattaforma.

Qualsiasi superficie di legno oliata deve essere trattata regolarmente (circa ogni 3 mesi) con olio per legno per assicurare una lunga durata.

Verificare regolarmente la presenza sotto la piattaforma di foglie, rami o altri oggetti indesiderati e rimuoverli per assicurare il suo completo e libero movimento.

La manutenzione meccanica della piattaforma deve normalmente essere eseguita esclusivamente in collegamento con l'ispezione semestrale di manutenzione ed essere effettuata da un tecnico di assistenza autorizzato.

Se si verificano guasti imprevisti o suoni anomali, contattate immediatamente il vostro rivenditore per risolverli.



Fig. 1
Telecomando

Telecomando (accessorio)

Nel telecomando sono installate due batterie. Per assicurare un funzionamento affidabile, sostituirle ogni sei mesi. Per sostituire le batterie eseguire i seguenti passaggi:

1. Allentare la vite sul pannello posteriore
2. Rimuovere il pannello posteriore.
3. Allentare la vite che trattiene le batterie.
4. Rimuovere le batterie vecchie e inserire quelle nuove.
5. Riposizionare il pannello posteriore e testare il dispositivo.



Se la corrente è stata scollegata dal telecomando o dal ricevitore per un lungo periodo di tempo, potrebbe essere necessario calibrare il sistema (abbinare le due unità). Procedere nel modo seguente:

Come abbinare ricevitore e trasmettitore:

Prima di iniziare:

- Verificare che i cavi nel ricevitore siano collegati correttamente alla scatola di comando nera.
- Assicurarsi che il sistema sia alimentato e che il bottone dell'arresto di emergenza non sia attivato.

Per abbinare il trasmettitore e il ricevitore:

1. Usare un oggetto appuntito e premere leggermente una volta l'interruttore nell'unità del ricevitore* (vedere Fig. 2)
2. Quindi, entro 5 secondi, premere contemporaneamente per un secondo i bottoni SU (↑) e GIU' (↓) sul telecomando.
3. Testare il sistema per assicurarsi che l'abbinamento sia stato eseguito correttamente; in caso contrario ripetere i passaggi 1 e 2 indicati qui sopra.



Fig. 2
Ricevitore

Possono essere collegati a un ricevitore/piattaforma fino a 4 telecomandi.



*NOTA! Se l'interruttore è schiacciato per 2 secondi o più gli abbinamenti di tutti i telecomandi saranno annullati. In tal caso tutti i telecomandi dovranno essere nuovamente abbinati al ricevitore.

13. Installazione e trasferimento

Questo modulo deve essere compilato al momento dell'installazione.

Cliente:	Prodotto:
Indirizzo:	N. del tipo di prodotto:
Codice postale:	Nr. di serie:
Telefono:	Data dell'installazione:
Accettazione dell'installazione da parte del cliente:	Installato da:

Lista di controllo:

N.	Descrizione	Effettuato?	Commenti
1	Testato congiuntamente al cliente	<input type="checkbox"/>	
2	Arresto di emergenza	<input type="checkbox"/>	
3	Modalità di sicurezza	<input type="checkbox"/>	
4	Esame del manuale	<input type="checkbox"/>	
5	Dimostrazione dell'allarme di protezione antischiacciamento	<input type="checkbox"/>	
6	Sovraccarico	<input type="checkbox"/>	
7	Funzionamento rampa/porta (interruttore)	<input type="checkbox"/>	
8	230 V all'unità di comando (non deve essere spenta)	<input type="checkbox"/>	
9	Sostituzione delle batterie del telecomando	<input type="checkbox"/>	
10	Abbinamento del telecomando.	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	

14. Lista di controllo della manutenzione

Oltre alla manutenzione generale descritta nella sezione 12, nella nostra qualità di fabbricante raccomandiamo che la piattaforma sia sottoposta a un'ispezione ordinaria ogni 6 mesi da parte di un tecnico di assistenza autorizzato.

Il rivenditore offrirà questo servizio ma se si preferisce usare un altro fornitore di assistenza, il proprietario della piattaforma ha la responsabilità di assicurare che il tecnico di assistenza scelto sia qualificato a effettuare l'assistenza sul prodotto.

Per ragioni di sicurezza è molto importante fare eseguire questa ispezione, poiché se non è fatta o se è eseguita in modo errato, possono derivare lesioni personali.



IMPORTANTE! Prima di ispezionare la piattaforma, o l'area sotto di essa, la piattaforma DEVE essere disaccoppiata dall'unità di comando in modo da evitare un funzionamento involontario. È responsabilità del tecnico dell'assistenza farlo prima di iniziare il lavoro di manutenzione.

N.B. Non è sufficiente scollegare semplicemente l'alimentazione di rete 230 V poiché il sistema passerà allora alla batteria ausiliaria.

Il modulo qui sotto deve essere compilato in occasione di ogni ispezione.

Cliente:		Prodotto:			
Indirizzo:		N. del tipo di prodotto: 100xxx			
Codice postale:		Nr. di serie:			
Telefono:		Data dell'installazione:			
Persona di riferimento:	Telefono:	Data dell'ultimo intervento:			
Data di installazione:	Piattaforma:	2 Stop:	IN:	Out:	Stairs Timeout:

Giorno e ora convenuti per l'intervento di manutenzione:

Accordi relativi all'intervento:

Lista di controllo:

<input type="checkbox"/> SW Ver. <input type="checkbox"/> Ristringere le viti M10 nei gradini. <input type="checkbox"/> Ristringere le viti M10 nelle guide su binari <input type="checkbox"/> Unità operative <input type="checkbox"/> Interruttore di arresto di emergenza <input type="checkbox"/> Segno carico <input type="checkbox"/> Controllo acustico degli attuatori. <input type="checkbox"/> Controllo del carico degli attuatori. <input type="checkbox"/> Sicurezza a infrarossi	<input type="checkbox"/> Tutti gli interruttori della piastra di pressione <input type="checkbox"/> Controllo del segnalatore acustico <input type="checkbox"/> Controllo acustico del motore della rampa <input type="checkbox"/> Controllo dell'attrito della rampa <input type="checkbox"/> Joystick <input type="checkbox"/> Manuale di funzionamento <input type="checkbox"/> Controllo barriera <input type="checkbox"/> Funzionamento porta <input type="checkbox"/> Serrature della porta e interruttori della porta
--	--

Pezzi di ricambio sostituiti

N. articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo

Follow-up telefonico	Commenti	
Altri commenti:		
Tecnico di assistenza:	Firma:	

15. Libretto manutenzione

Modulo da compilare a ogni ispezione.

Cliente:		Prodotto:	
Indirizzo:		N. del tipo di prodotto: 100xxx	
Codice postale:		Nr. di serie:	
Telefono:		Data dell'installazione:	
Persona di riferimento:	Telefono:	Installato da:	
Data di installazione:	Piattaforma:	2 Stop:	IN: Out: Stairs Timeout:

N.	Data:	Commenti	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

16. Pezzi di ricambio

Devono essere usati ogni volta pezzi di ricambio originali. La sostituzione dei pezzi può essere realizzata solo da tecnici di assistenza autorizzati.

Se sono usati pezzi di ricambio diversi da quelli prescritti la garanzia si annullerà e Liftup al tempo stesso declinerà ogni responsabilità riguardo la sicurezza del prodotto.

Pezzo n.	Descrizione
101175	Pacchetto pezzi di ricambio - rivenditore
100255	Kit di montaggio per gradini
100298	Sospensione blocco rampa - Compact
100328	Piastra per colonna elevatrice
100336	Motore DC per rampa - Compact
100338	Micro interruttore – sistema di sicurezza- V4L IP67
100339	Bottone di arresto di emergenza
100360	Scheda di terminazione della sicurezza a infrarossi
100361	Scheda madre - CP & EL
100363	Cavo di programmazione incl. software – Compact/EasyLift
100409	Cavo Micromatch per circuito stampato a infrarossi
100410	Prolunga SUB15 M/F
100413	Molla per blocco rampa.
100418	Joystick con gomma – 30 mm
100419	Attuatore - Prolunga M/F
100425	Cavo a spirale SUB15-7/7
100426	Motore DC per barriera di sicurezza
100429	Pulsante - Elevatore
100430	Pulsante - Scala
100433	Connettore Micromatch 6-pin
100455	Cavo per DL4
100487	DL4 per Compact, raccolto + esteso
100582	Attuatore raccordi interni (DB4)
101131	Valvole manicotto attuatore, set
101157	Cavo con spina DIN 4-poli, 10m



17. Smontaggio

Per assicurare un corretto smontaggio prima di qualsiasi riutilizzo in un'altra installazione, raccomandiamo di avvalersi di un tecnico di assistenza autorizzato. Contattate il vostro rivenditore per avere assistenza per lo smontaggio.

Sottolineiamo che c'è il rischio di rovesciamento quando la EasyLift è staccata dall'edificio.

18. Smaltimento

È responsabilità del proprietario smaltire questo prodotto in conformità con le normative applicabili al momento.

Ricordiamo, in particolare, che le batterie nell'unità di comando devono essere smaltite separatamente.

Se necessario, chiedete al vostro rivenditore assistenza per lo smaltimento.

19. Garanzia

La garanzia è valida in conformità con le normative che regolano le garanzie nel momento in questione. Consultare i termini di vendita e consegna per ulteriori informazioni.

La garanzia è valida esclusivamente se sono effettuate le ispezioni di manutenzione prescritte.

Se il cliente decide di non eseguire queste ispezioni, Liftup non sarà più responsabile della sicurezza del prodotto. È quindi responsabilità del cliente assicurare che la piattaforma in qualsiasi momento sia conforme alle normative di sicurezza applicabili.

Vi auguriamo un buon utilizzo della vostra nuova EasyLift!

Cordiali saluti, Liftup